

Tipps und Informationen

Unsere Parodontometer

können nach allen üblichen Methoden gereinigt, sterilisiert (Autoklav oder Heißluft) und desinfiziert werden.

Bitte sehen Sie hierzu auch unsere Herstellerinformation EN ISO 17664 zur Aufbereitung.

VERMEIDEN VON KALKBELÄGEN

1. Maschinell

Die Enthärtung Ihres Thermodesinfektors muss korrekt eingestellt sein.



Bild - Kalkablagerungen

2. Manuell

Spülen mit voll entsalztem Wasser.

ENTFERNEN von KALKIGEN WASSERFLECKEN, MILCHIG WEIßEN KALKBELÄGEN oder VERKRUSTUNGEN

1. Entfernen mit Reinigungslösung (möglich auch Haushaltsreiniger VISS) und einem weichen Schwammtuch.
2. Entfernen mit säurehaltigen Refresh-Produkten (z.B. Neodisher N) oder mit Essigsäure.